


OxyPAP®


Instrucciones para uso

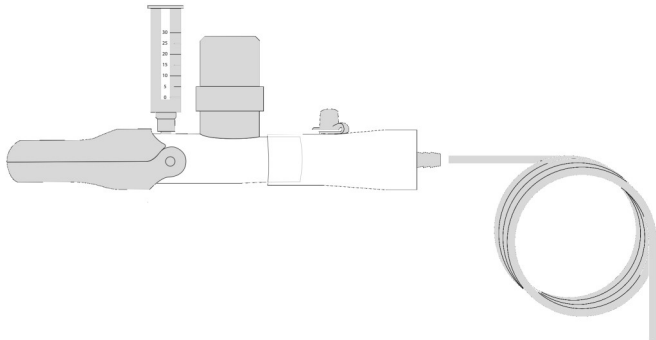

Indicaciones para el uso

El dispositivo D R Burton OxyPAP® está indicado para el tratamiento y prevención de atelectasias. También tiene la capacidad de proporcionar oxígeno suplementario cuando se usa con oxígeno comprimido. El dispositivo es para pacientes (de 5 años en adelante) que son capaces de seguir instrucciones para la terapia de presión positiva en las vías respiratorias (PAP). El uso normal de OxyPAP no debe ser más de 24 horas de uso combinado total. El entorno de uso es en un hospital o entorno clínico.

Partes del OxyPAP

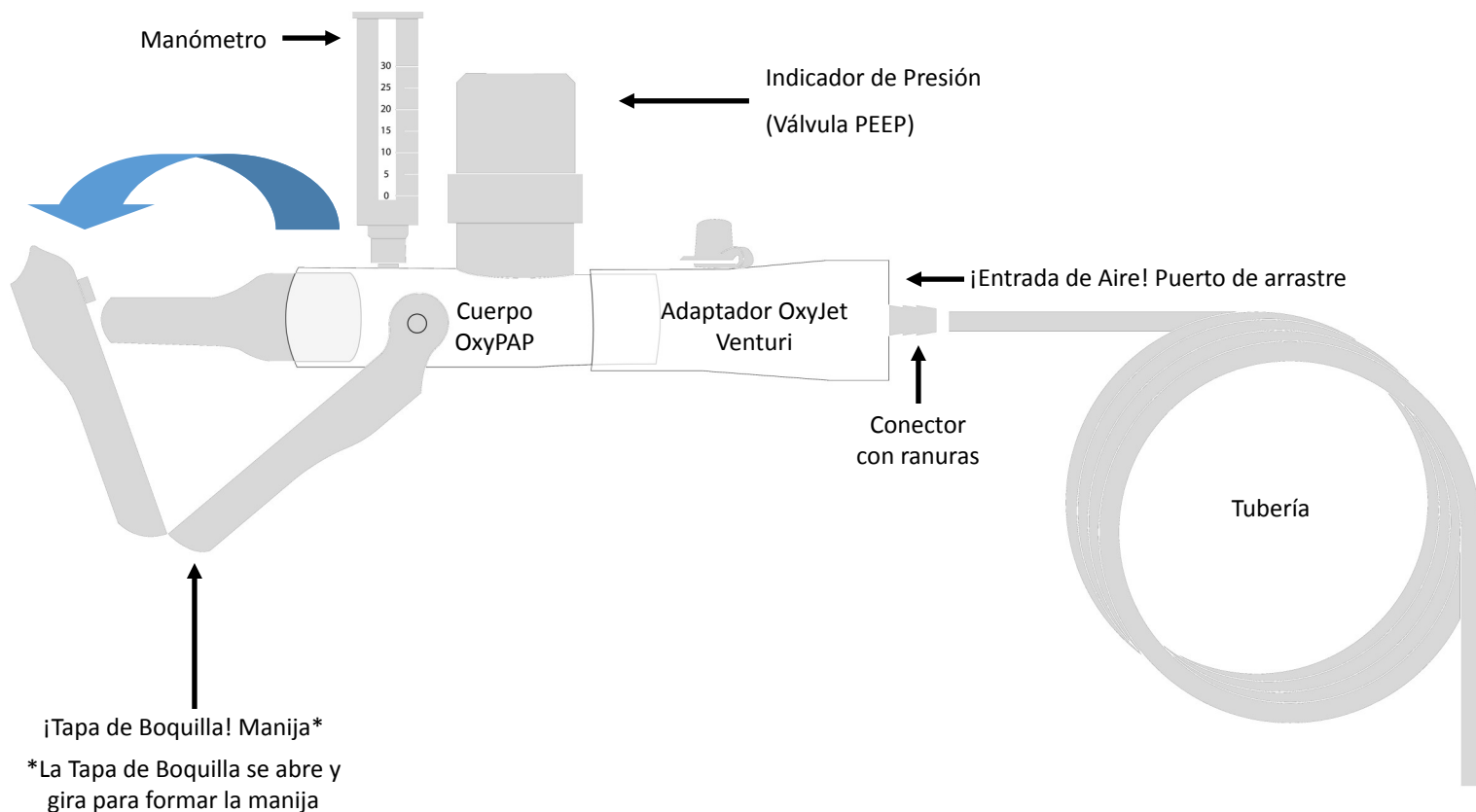

Contraindicaciones

Aunque no se han informado contraindicaciones absolutas para el uso de la terapia PAP, se debe evaluar cuidadosamente lo siguiente antes de tomar la decisión de iniciar la terapia:

- Incapacidad para tolerar un mayor esfuerzo de respiración
- Presión intracraneal (PIC) > 20 mm Hg
- Cirugía o trauma reciente facial, oral, esofágica o craneal
- Neumotórax no tratado
- Ruptura de membrana timpánica conocida o sospechada u otra patología del oído medio
- Inestabilidad hemodinámica.
- Sinusitis aguda
- Epistaxis
- Hemoptisis Activa
- Nausea

Advertencias

Reacciones Adversas pueden incluir:

- Mayor esfuerzo de respiración que puede conducir a hipoventilación e hipercarbia.
- Aumento de presión craneal
- Compromiso Cardiovascular
- Isquemia Miocárdica
- Disminución del retorno venoso
- Ingestión de aire con mayor riesgo de vómitos y aspiración.
- Claustrofobia
- Baro trauma Pulmonar

Instrucciones de uso

Preparación:

1. Conecte el adaptador OxyJet® Venturi al cuerpo OxyPAP® como se muestra en la página anterior
2. Abra la tapa de la boquilla OxyPAP y colóquela perpendicular al cuerpo del dispositivo para usarlo
3. Conecte el manómetro (si está incluido) al puerto de presión OxyPAP, entre la boquilla y el Indicador de presión
4. Conecte un extremo del tubo (incluido) al conector con ranuras OxyPAP
5. Conecte el otro extremo del tubo al medidor de flujo de la fuente de gas.
6. Ajuste el medidor de flujo de la fuente de gas a 10 LPM
7. Gire el indicador de presión a la configuración de resistencia de la vía aérea espiratoria deseada

Procedimiento:

1. Coloque la boquilla en la boca del paciente e indique al paciente que respire contra la resistencia generada por el OxyPAP
 - Indique al paciente que se relaje durante la respiración diafragmática.
 - Verifique que el paciente mantenga un sello hermético en la boquilla durante la terapia
 - Aconseje al paciente que use una pinza nasal, si es necesario.
2. Monitoree la presión de la vía aérea y ajuste el medidor de flujo de la fuente de gas para lograr la presión espiratoria deseada
3. Asegure que el paciente continúe respirando con OxyPAP hasta que se le indique que pare

Aviso: Una sesión de terapia tiene la intención de no durar más de 20 minutos. Realice la terapia 3 veces al día, o según las indicaciones de su médico.

Advertencias:

- NO SE RECOMIENDA PERMITIR PRESIONES SUPERIORES A 20 cm H₂O DURANTE LA RESPIRACIÓN
- NO AUMENTE EL MEDIDOR DE FLUJO DE LA FUENTE DE GAS POR ENCIMA DE 15 LPM
- ¡NO OBSTRUYA LA ENTRADA DE AIRE! (PUERTO DE ARRASTRE) DURANTE EL USO
- NO INTENTE ESTERILIZAR EL DISPOSITIVO
- NO SUMERJA EL DISPOSITIVO EN LÍQUIDO
- EL OxyPAP NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO CON VENTILACIÓN INVASIVA

Aviso: Reemplace el dispositivo OxyPAP después de 24 horas de uso acumulativo o inmediatamente si está dañado.

Especificaciones Generales

ENTORNO OPERATIVO

Temperatura:	10 - 40°C (50 - 104°F)
Humedad Relativa:	0 - 95%
Presión Atmosférica:	540 - 1060 hPa

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Temperatura:	-20 - 45°C (-4 - 113°F)
Humedad Relativa:	0 - 95%
Presión Atmosférica:	440 - 1060 hPa

La precisión del manómetro se ha verificado de 0 a 30 cmH₂O.

Uso de un solo paciente solamente.

No comparta ni use con múltiples pacientes.

No está hecho con caucho natural.



Limpieza del OxyPAP

Durante el curso del tratamiento, el OxyPAP puede acumular secreciones o ensuciarse y requerir limpieza. Siga las instrucciones a continuación para limpiar el OxyPAP, según sea necesario.

Desmontaje

1. Asegúrese de que el medidor de flujo de la fuente de gas esté cerrado
2. Desconecte el tubo de suministro de gas del conector con ranuras OxyJet®
3. Desconecte el manómetro (si está presente) del puerto de presión OxyPAP
4. Retire la boquilla del cuerpo OxyPAP
5. Desconecte el adaptador OxyJet Venturi del cuerpo OxyPAP

Limpieza

1. Lave la boquilla y el adaptador OxyJet Venturi con detergente líquido para platos y agua tibia.
2. Enjuague la boquilla, el OxyJet y el cuerpo OxyPAP bajo el chorro del agua del grifo, *teniendo cuidado de no sumergir el dial de presión OxyPAP al enjuagar*

Avisos:

- Se puede usar un cepillo para botellas o un limpiador de pipas para eliminar las acumulaciones del cuerpo de OxyPAP durante la limpieza
- El indicador de presión OxyPAP, el manómetro y el tubo de suministro de aire se pueden limpiar limpiando las superficies externas con un pañuelo humedecido con alcohol isopropílico al 70%

Secado y reensamblaje

1. Seque las piezas al aire completamente o séquelas con un paño sin pelusa antes de volver a armar
2. Inspeccione visualmente el dispositivo; Si se observa suciedad, repita los pasos de limpieza. Si se observa algún daño, deseche y reemplace el dispositivo.
3. Vuelva a armar el dispositivo siguiendo las instrucciones de la página anterior antes del siguiente uso.

D • R Burton Healthcare LLC
3936 South Fields Street
Farmville, NC 27828

Teléfono: (252) 228 - 7038

Web: www.drburtonhpi.com

de Reorden 562 (con manómetro)
de Reorden 563 (sin manómetro)

D • R Burton, OxyJet y OxyPAP son marcas registradas de D • R Burton Healthcare LLC. OxyPAP es una marca registrada de D • R Burton Healthcare LLC.

© 2020 D • R Burton Healthcare LLC.

Todos los derechos reservados.